

Guide de démarrage rapide

Veuillez lire le feuillet de renseignements sur le produit pour obtenir de plus amples renseignements avant de commencer le test.

Ce test est destiné à être utilisé comme aide pour le diagnostic clinique de la COVID-19, mais il ne devrait pas être le seul guide pour prendre en charge votre maladie. Veuillez consulter un professionnel de la santé si vos symptômes persistent ou s'aggravent.

AVERTISSEMENT : NE PAS DÉBALLER les articles de la trousse avant que l'application ne vous demande de le faire.

Pour commencer

Le test prend environ 20 minutes à réaliser. L'application vous guidera à chaque étape. Vous devez avoir une connexion cellulaire ou Wi-Fi active pour effectuer le test.

1 Téléchargez l'application Scanwell® Health



Recherchez « Scanwell Health » dans votre boutique d'applications.

2 Inscrivez-vous ou ouvrez une session dans l'application



3 Suivez les étapes de la vidéo



4 Résultat fourni en 15 minutes



Besoin d'aide? Communiquez avec nous au 1-844-4-VERITOR (1-844-483-7486).

 Becton, Dickinson and Company
7 Loveton Circle
Sparks, Maryland 21152 USA



bd.com/e-labeling



256121
500059571(01)
2021-12

BD, the BD Logo, and Veritor are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2021 BD. All rights reserved.